

Link do produktu: <http://www.tytanowepaznokcie.pl/ddn9-koncentrat-do-wanienki-1000ml-medilab-p-781.html>



DDN9 Koncentrat do wanienki 1000ml MEDILAB

Cena	75,00 zł
Numer katalogowy	3701387500110
Kod producenta	3701387500110
Kod EAN	3701387500110

Opis produktu

Preparat do dezynfekcji i mycia endoskopów, narzędzi i wyrobów medycznych, do stosowania w roztworach roboczych. Charakterystyka: - szerokie spektrum biobójcze w czasie 15 minut (bakterie, drożdżaki, wirusy (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia)) - stężenie roztworu roboczego: 0,5% - posiada wysoką kompatybilność materiałową, może być stosowany do mycia i dezynfekcji delikatnego sprzętu medycznego - neutralne pH - rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne, usuwa biofilm i zapobiega jego powstawaniu - utrzymuje swoje właściwości również w bardzo twardej wodzie - narzędzia mogą być bezpiecznie przechowywane w roztworze do 72 godzin - odpowiedni do stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych Stosowanie: 1. Wanienkę dezynfekcyjną (lub myjkę ultradźwiękową) napełnić wodą. 2. Na każdy liter wody wlać 5 ml koncentratu i zamieszać. 3. Narzędzia dokładnie zanurzyć w roztworze, w przypadku endoskopu wypełnić wszystkie jego kanały. 4. Wanienkę przykryć i odczekać 15 minut - zalecany czas kontaktu. 5. Po upływie czasu kontaktu wyjąć i wypłukać wyroby medyczne pod bieżącą wodą, doczyścić jeśli trzeba. 6. Osuszyć narzędzia i poddać je dalszym procesom higienicznym zgodnym z przyjętymi procedurami. Skład chemiczny: czwartorzędowe związki amonu, inhibitory osadzania kamienia, kationowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne. Pojemność: 1L (butelka z dozownikiem przelewowym)