

Link do produktu: <http://www.tytanowepaznokcie.pl/enzymex-l9-koncentrat-do-wanienki-1000-ml-medilab-p-853.html>



Enzymex L9 koncentrat do wanienki 1000 ml MEDILAB

Cena	100,00 zł
Numer katalogowy	3701387502572
Kod producenta	3701387502572
Kod EAN	3701387502572

Opis produktu

Trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych. skuteczny wobec biofilmu skuteczny już w 0,5% stężeniu w czasie 10 minut badania wg fazy 2/2 norm europejskich w warunkach brudnych Koncentrat – stosować w roztworach roboczych. Opis produktu: płynny preparat o doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych i myjących skuteczny wobec biofilmu szerokie spektrum biobójcze w czasie 10 minut: B, Tbc, Y, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona) stężenie roztworu roboczego od 0,5% przebadany w warunkach brudnych wg fazy 2/1 i fazy 2/2 norm europejskich kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) w połączeniu z detergentami rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę, białko, itp.) i zapobiega ich utrwalaniu (zaschnięciu, koagulacji) neutralne pH roztworu – wysoka kompatybilność materiałowa potwierdzona licznymi testami analiza elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1 narzędzia mogą być bezpiecznie przechowywane w roztworze nawet do 72 godzin preparat zachowuje aktywność niezależnie od jakości wody możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych PROCEDURA MANUALNA W MYJCE ULTRADŹWIEKOWEJ Napełnij wanienkę dezynfekcyjną lub myjkę ultradźwiękową wodą. Na każdy litr wody wlej odpowiednią ilość koncentratu (5 ml koncentratu na litr wody). Zamieszaj roztwór. Dokładnie zanurz narzędzia. Wypełnij płynem wszystkie kanały endoskopu. Wanienkę dezynfekcyjną przykryj. Odczekaj zalecany czas kontaktu: 10 minut. Doczyść, jeśli to konieczne. Wyjmij i wypłucz dokładnie wyroby medyczne pod bieżącą wodą. Osusz i poddaj dalszym odpowiednim procesom higienicznym zgodnym z przyjętą procedurą. Preparat do użytku profesjonalnego. Pojemność: 1000 ml