

Link do produktu: <http://www.tytanowepaznokcie.pl/mediwipes-plus-chusteczki-alkoholowe-dezynfekcji-narzedzi-powierzchni-gotowy-roztwor-48-sztuk-medilab-p-1232.html>



Mediawipes Plus Chusteczki alkoholowe dezynfekcji narzędzi, powierzchni, gotowy roztwór 48 sztuk MEDILAB

Cena	36,00 zł
Numer katalogowy	chust5902340984352ecz ki100_20221208102256
Kod producenta	chust5902340984352ecz ki100_20221208102256
Kod EAN	5902340984352

Opis produktu

Chusteczki na bazie alkoholu do dezynfekcji m.in powierzchni. Idealnie nadają się do czyszczenia buteleczek z lakierami hybrydowymi, pojemników do żelu do paznokci. dezynfekcja małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania pełne działanie wirusobójcze wygodna i szybka forma aplikacji Preparat do użytku profesjonalnego. Wyrób medyczny kl. II a, CE 0482. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 8178/20 (Kat. I, gr. 2 i 4). Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną. Ilość w opakowaniu: 48 sztuk Szczegóły produktu: wykazują szerokie spektrum biobójcze: bakterio-; drożdżako-; grzybo-; prątko- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) czas działania: min. 1 min. zalecane do powierzchni odpornych na działanie alkoholi dopuszczone do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością idealne do dezynfekcji zabawek możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych dostępne w różnych opakowaniach, w tym w komfortowym opakowaniu typu flow-pack – zawierającym chusteczki w dużym rozmiarze i wysokiej gramaturze Preparat do użytku profesjonalnego. Jednorazowe chusteczki gotowe do użycia. SPOSÓB UŻYCIA: Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę. Przetrzeć chusteczką całą powierzchnię dezynfekowanego wyposażenia. Odczekać zalecany czas ekspozycji – min. 30 sekund. Nie spłukiwać. Pozostawić do wyschnięcia. Pojemnik z chusteczkami szczelnie zamknąć. UWAGA: – nie stosować na materiały wrażliwe na alkohol (np. pleksi, powierzchnie lakierowane, bejcowane), – nie używać w pobliżu źródeł ognia, nie nanosić na urządzenia podłączone do prądu. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością po wykonanej procedurze dezynfekcyjnej należy dodatkowo zmyć wodą zdatną do picia.